

## Redigere kalender/ innstillinger

Når Clockaid vises på skjermen kan du få tilgang til agenda og innstillinger.

Sveip over skjermen med to eller tre fingre samtidig. Nå åpnes et nytt bilde med valgene "kalender" og "innstillinger".

Hvis du vil ut av dette skjermbildet, trykk på krysset øverst i høyre hjørne.

### Kalender

(Bare: 'Connect' og 'DayView')

Hvis du klikker på "kalender" åpnes et nytt skjermbilde. På venstre side vises en kalender med dagens dato. På høyre side kan man legge inn ulike avtaler og hendelse med detaljer som tidspunkt, sted, osv.



01 Today

01 Day with repeated activities

01 Selected day

01 Day with activities


### Opprette ny hendelse:

- Velg riktig dag.
- + Press på.
- Velg tidspunkt.
- Velg et ikon som passer, eller skriv inn tekst.
- Velg om hendelsen skal gjentas daglig, ukentlig eller månedlig.
- Press på "lagre".
- Klikk på krysset i øvre høyre hjørne for å avslutte
- Nå vises det i beskjed delen av klokken.

### Innstillinger

(Bare: 'Time+', 'Connect' og 'DayView')

Hvis du klikker på "innstillinger" åpnes et nytt skjermbilde med ni forskjellige innstillingskategorier.

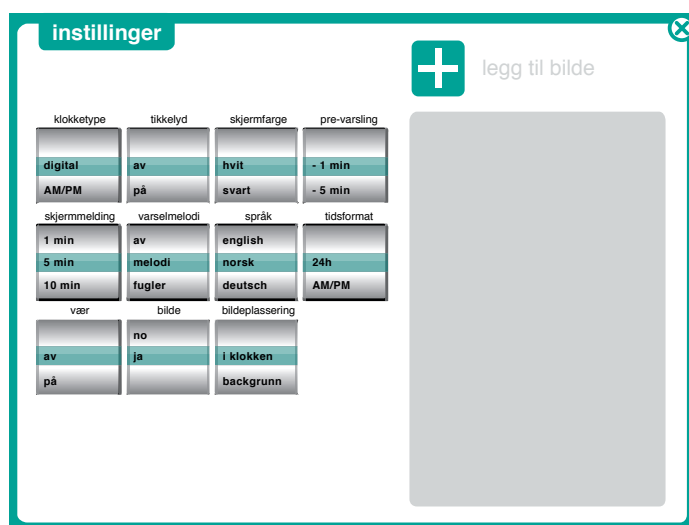

- VIER klokke typer. Analog moderne, analog klassisk eller digital, AM/PM.
- Tikkelyd: Tikking på eller av.
- Varselblink: Lyssignal før hendelse i kalenderen begynner, velg mellom 1, 5, 10, 30 eller 60 minutter i forkant.
- Varsellyd: (obs! Sjekk at riktig lydstyrke er innstilt på selve nettbrettet). Lydsignal før hendelse i kalenderen begynner, velg mellom 1 eller 5 minutter i forkant.
- Melodi: Velg blant flere melodier
- Bakgrunn: Velg bakgrunnsfarge hvit, svart eller grå
- Språk: velg språk du ønsker
- Vær: show eller hide
- Time variant: 24h eller AM/PM
- Bilde: no/ja.
- Plassering av bilde: Velg mellom bilde plassert inne i klokken eller i bakgrunnen
- Klikk på krysset i øvre høyre hjørne for å avslutte

### Nettbrett innstillinger

- For at ikke skjermen skal slåes seg av, må ikke tidsavbrudd for skjermen være aktivert!  
Se i bruksanvisningen til nettbrettet ditt!
- Velg ønsket skjermlysstyrke og det gode lydnivået (for varsler).
- Klokken fungerer horisontalt og vertikalt.

## Rediger via internet

## Rediger agenda og legg ut bilde

- Logg inn på [www.clockaid.com](http://www.clockaid.com) med bruk av din e- post og passord.
- Velg Clockaid klokke (i tilfelle du hjelper mer en en person)
- Legg inn i kalender, møte etc.
- Velg et bilde
- Lagre og logg ut.

maandag 30 december

zo ma di wo do vr za

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 01 02 03 04

« DECEMBER 2019 »

+ voeg activiteit toe

Agenda Foto Instellingen

◀ Velg dag-dato

◀ Legg til en aktivitet

Uur Min activiteiten

+ + +

13 30 BEZOEK

- - -

Thuiszorg komt!

herhaal niet

Velg vil

Cancel bewaar

◀ Velg (start) tid

◀ Velg et bilde

◀ Spar

## Og, Forklar alt tydelig til den som skal se på klokken

Husk demp å at Clockaid er bare en klok som står på hele tiden og gi dem alltid riktig informasjon om dagen. Men at den også (modell notes og connect) huske demp å viktig saker som skal skje snart som folk som kommer in eller andre avtaler. Kontroller med dem om lyden og lys er ønskelig. Sjekk de regelmessig om alt bli riktig forstatt.

## Plasse foto på klokkesjerm

## LET OP:

- Gå til innstillinger på klokkebrettet:
- Velg plassering av foto: i ansiktet eller bakgrunnen
- Logg inn på [www.clockaid.com](http://www.clockaid.com)
- Velg 'PHOTO'-knappen

Agenda:

DEMO

Velg vil Upload

◀ Velg bilde og laste opp

## Produkter &amp; Konto

## Produkter

Hver Clockaid nettbrett bruker har en egen profil navn som du kan velge selv. Dette er nyttig hvis du forvalter flere brukere.

## Konto

Under Profiler kan du legge inn eller endre profil navn. Når du er ferdig, press på lagre og logg deg ut.

Log uit | info@clockaid.com

clockaid™

CLOCKAID AGENDA KALENDER KLOK AGENDA'S BEHEREN CONTACT

Producten

Nieuw serienummer

Voeg een serienummer toe

SERIENUMMER ZAL HIER GETOONT WORDEN

Serial

Alle wijzigingen opslaan

Account

E-mailadres

Wachtwoord wijzigen

Huidig wachtwoord \*

Nieuw wachtwoord \*

Bevestig het nieuwe wachtwoord \*

Alle wijzigingen opslaan

Annuleer