

Agenda/ instellingen bewerken

Als u met 2 of 3 vingers tegelijk van onder naar boven over het klok-scherm 'swiped' opent er een nieuw scherm met de opties "agenda" en "instellingen". Om uit dit menu te komen drukt u op de 'X' rechts boven in het blok.

Agenda

(Uitsluitend: 'Connect' en 'Dayview')

Als u op "agenda" drukt opent zich het agenda menu. Deze heeft aan de linker kant de kalender.

Aan de rechterkant legt u de afspraak of gebeurtenis vast met tijdstip en andere details.



01 Vandaag

01 Dag met herhaal activiteiten

01 Geselecteerde dag

01 Dag met activiteiten


Noteren van een nieuwe afspraak of gebeurtenis:

- Kies de gewenste dag.
- Druk op +.
- Stel de tijd in.
- Kies desgewenst uit de 5 vooringestelde mogelijkheden of schrijf eigen boodschap.
- Kies bij terugkerend 'event' uit: dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks.
- Druk op "bewaar".
- Druk op X in de rechterbovenhoek als u klaar bent.
- Het scherm sluit. U kunt nu nog een afspraak of gebeurtenis toevoegen of sluiten.

Instellingen

(Uitsluitend: 'Connect' en 'Dayview')

Als u op "instellingen" drukt opent zich het instellingen menu.

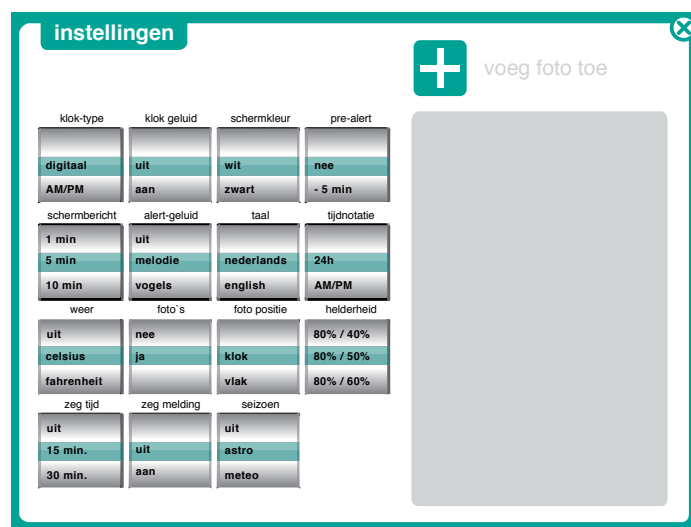

- Klok type: kies uit kloktypen: modern, klassiek, digitaal, AM/PM, DayView of DayView digitaal
- Klokgeluid: tikken van de analoge klok: aan/uit.
- Schermkleur: kies schermkleur van de klok: wit, zwart of grijs.
- Pre alert: kies de start van het (1 min. durende) pre-alert.
- Schermbericht: stel de tijd in dat bericht in scherm staat.
- Alert geluid: kies de gewenste alert-tone.
- Taal: kies de gewenste taal.
- Tijdnotatie: 24h of AM/PM.
- Weer: uit, in Celsius of Fahrenheit
- Foto's: ja/nee. Bij meerdere foto's worden deze in een carroussel geplaatst. Zie ook 'online foto plaatsen'.
- Foto-positie: in 'wijzerplaat' of in de achtergrond.
- Helderheid: helderheidscherm ' dag-nacht' aanpassen (nacht: 23u-6u).
- Spreek tijd: uit, kies frequentie.
- Spreek bericht: uit of aan.
- Seizoen: uit, kies seizoens-indeling.

Druk op 'X' in de rechter-bovenhoek als u klaar bent.

Tablet instellingen

- Zorg dat het scherm van de tablet altijd 'AAN' staat. Kijk in de handleiding van uw tablet!
- Kies de gewenste schermhelderheid en het goede geluidsniveau (tbv alerts).
- Klok werkt horizontaal en verticaal.

Online bewerken

Agenda bewerken en foto plaatsen

- Log in op de homepage www.clockaid.com, m.b.v. emailadres en wachtwoord.
- Vul de agenda in: datum, activiteiten, afspraken etc.
- Voeg evt. foto toe.
- Bewaar de opdrachten.

◀ Kies de dag-datum

◀ Voeg een activiteit toe

◀ Kies (start)tijd

◀ Selecteer een foto

◀ Bewaar

Goede uitleg aan gebruiker i.c. de klok-kijker!

Tenslotte: het verdient aanbeveling om een goede uitleg van deze Clockaid klok te geven aan de gebruiker: dat Clockaid eigenlijk gewoon een klok is die altijd de juiste tijd, dag en datum geeft. Maar dat deze ook helpt herinneren: aan het innemen van medicijnen, afspraken, etc. Toon het visuele signaal en kies samen het gewenste geluid. Controleer na enkele dagen en later met enige regelmaat of de gebruiker een en ander nog goed begrijpt en interpreteert.

Foto plaatsen op klokscherm

LET OP:

- Ga op de klok-tablet naar instellingen:
- Kies de locatie van de foto: op wijzerplaat of achtergrond
- Log in op de homepage www.clockaid.com
- Kies de knop 'Foto'

◀ Kies 'Foto' en upload

Producten & Account

Producten

Hier kunt u de Clockaid tablet of meerdere tablets voorzien van een herkenbare 'naam'. Dit is alleen relevant wanneer u 'op afstand' meerdere agenda's beheert.

Account

Bij Account kunt u de accountgegevens bewerken.