

Nettbrett innstillinger

For at ikke skjermen skal slåes seg av, må ikke tidsavbrudd for skjermen være aktivert! Hvis dette ikke er mulig kan du laste ned 'Screen Time Out Toggle' for android på Google Play gratis.
Lysstyrke og volum stilles inn etter behov.

Redigere kalender/ innstillinger

Når Clockaid vises på skjermen kan du få tilgang til agenda og innstillinger.
Sveip over skjermen med to eller tre fingre samtidig. Nå åpnes et nytt bilde med valgene "kalender" og "innstillinger".
Hvis du vil ut av dette skjermbildet, trykk på krysset øverst i høyre hjørne.

kalender

(Agenda gjelder bare før modell: 'Connect' og 'Dayview')

Hvis du klikker på "kalender" åpnes et nytt skjermbilde. På venstre side vises en kalender med dagens dato. På høyre side kan man legge inn ulike avtaler og hendelse med detaljer som tidspunkt, sted, osv.




Opprette ny hendelse:

- ✓ Velg riktig dag.
- ✓ + Press på.
- ✓ Velg tidspunkt.
- ✓ Velg et ikon som passer, eller skriv inn tekst.
- ✓ Velg om hendelsen skal gjentas daglig, ukentlig eller månedlig.
- ✓ Press på "lagre".
- ✓ Klikk på krysset i øvre høyre hjørne for å avslutte
- ✓ Nå vises det i beskjed delen av klokken.

innstillinger

(BARE: 'Time+', 'Connect' og 'Dayview')

Hvis du klikker på "innstillinger" åpnes et nytt skjermbilde med ni forskjellige innstillingskategorier.

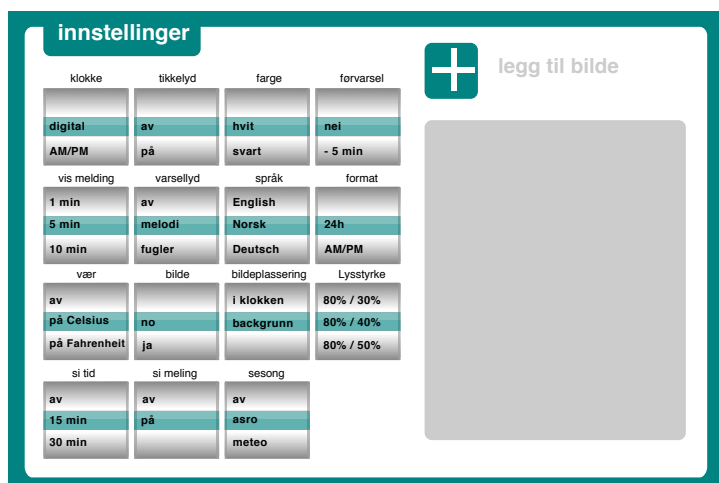

- ✓ Klokke: velg analog moderne, analog klassisk, digital, AM/PM eller Dayview som gi en oversikt over dagens hendelser.
- ✓ Tikkelyd: Ticking på eller av.
- ✓ Farge: velg bakgrunnsfarge hvit, svart eller grå.
- ✓ Førvarsel: velg starttid av pre-varsel som tar 1 minutt.
- ✓ Vis melding: hvor lenge meldingen forblir på Skjermen etter alarmen.
- ✓ Varsellyd: felg blant flere melodier.
- ✓ Språk: velg språk du ønsker.
- ✓ Format: 24h eller am/pm.
- ✓ Vær: av, Celsius eller Fahrenheit.
- ✓ Bilde: felg ja eller nei.
- ✓ Bildeplassering: hvor bilde er plassert i skjermen.
- ✓ Lysstyrke: velg forhold till dag og natt lysstyrke. (natt kl.23-06)
- ✓ Si tid: av, velg frekvens
- ✓ Si medling: av eller på
- ✓ Sesong: av, velg sesongformat

Klikk på krysset for å komme seg ut av menuet.

Legg inn via internett

Logg inn på clockaid.com med bruk av din e-post og passord. Bl.a. kan du her redigere konto din og kan du gi et kort navn til product key code.

Rediger via internet

Legg inn via internett

- ✓ Logg inn på clockaid.com med bruk av din e-post og passord.
- ✓ Velg Clockaid klokke (i tilfelle du hjelper mer en en person)
- ✓ legg inn i kalender, møte etc.
- ✓ lagre og logg ut.



- 01 Today
- 01 Day with repeated activities
- 01 Selected day
- 01 Day with activities


Produkter & Konto

Produkter

Hver Clockaid nettbrett bruker har en egen profil navn som du kan velge selv. Dette er nyttig hvis du forvalter flere brukere.

Konto

Under Profiler kan du legge inn eller endre profil navn. Når du er ferdig, press på lagre og logg deg ut.

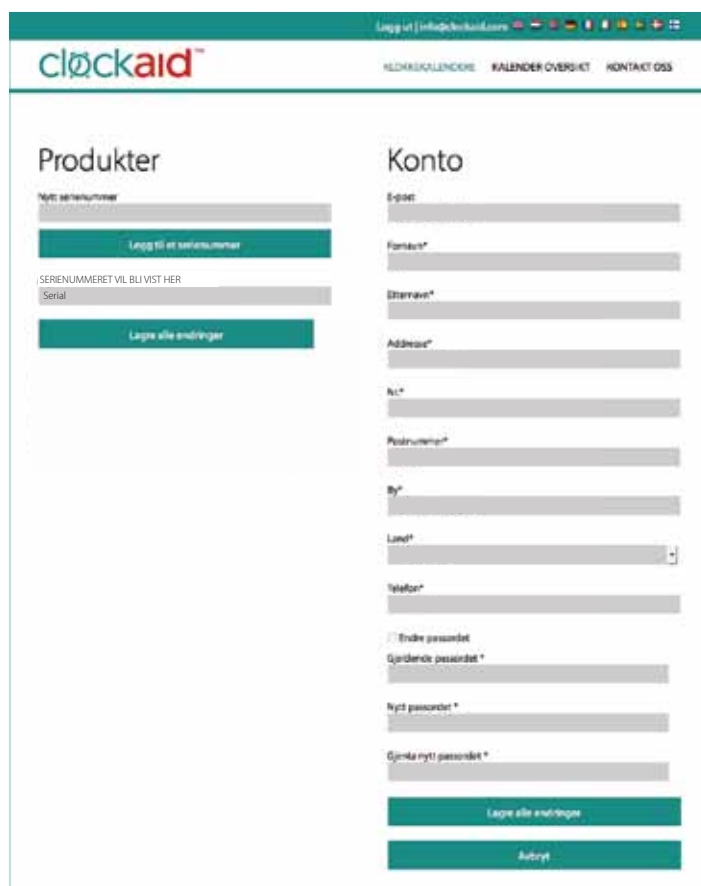

Og, Forklar alt tydelig til den som skal se på klokken

Husk demp å at Clockaid er bare en klok som står på hele tiden og gi dem alltid riktig informasjon om dagen. Men at den også (modell notes og connect) huske demp å viktig saker som skal skje snart som folk som kommer in eller andre avtaler. Kontroller med dem om lyden og lys er ønskelig. Sjekk de regelmessig om alt bli riktig forstatt.